


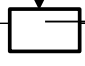
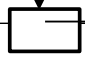




<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN KESEHATAN RI DITJEN P2</p>  <p style="text-align: center;">BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR</p>	NOMOR SOP	: OT.02.02/2.1/ 2781 /2020
	TGL. PEMBUATAN	: 17 Juli 2020
	TGL. REVISI	: 14 Maret 2025
	TANGGAL	: 14 Maret 2025
	DISAHKAN OLEH	 <p style="text-align: center;">KEPALA r. ACHMAD FARHANNY TRI ADRYANTO, MKM NIP: 196902192002121003</p>
TIM KERJA PENGAWASAN FAKTOR RISIKO KESEHATAN ORANG, KEGAWATDARURATAN DAN SITUASI KHUSUS	NAMA SOP	PEMAKAIAN NEBULIZER
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan 2. Permenkes RI No. 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan 3. Permenkes RI No. 12 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan 4. Permenkes RI No. 23 tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Penerbitan sertifikat vaksinasi Internasional 5. IHR Tahun 2005 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fungsional Dokter 2. Fungsional Perawat 	
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Nebuleizer 2. Obat bronkodilator sesuai indikasi 3. Masker nebulizer 4. Kapas alkohol untuk membersihkan 5. Diagnostik Set 6 ATK 	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Tidak terlaksananya SOP berakibat pelayanan terganggu	Disimpan dalam bentuk soft copy dan hard copy	

PROSEDUR PEMAKAIAN NEBULIZER

NO	KEGIATAN	MUTU BAKU			KETERANGAN		
		Dokter Fungsional	Perawat Fungsional	KELENGKAPAN		WAKTU (menit)	OUTPUT
1	Melakukan pencatatan pasien yang datang ke klinik			ATK	2	Data umum pada registrasi	
2	Melakukan pemeriksaan pada pasien			Diagnostik Set	5	Data hasil	
3	1.Pegang nebulizer kit dengan tangan kanan www.alatkehatanjogja.com 2.Tekan tombol power ke posisi (ON) kompresor akan hidup dan nebulizer akan segera bekerja, untuk menghentikan nebulizer tekan tombol O (Off) 3.Inhalasikan obat sesuai dengan petunjuk Dokter 4.Apabila inhalasi telah selesai matikan alat dengan keposisi "OFF" (seperti langkah No. 2 Diatas) 5.Lepaskan selang dari Nebulizer kit 6.Periksa dan pastikan bahwa selang telah bersih dari cairan apapun, jika tidak dapat menyebabkan terjadinya penularan infeksi melalui selang 7.Lepaskan selang dari kompresor dan lepaskan kabel dari sumber listrik			Alat Nebuleizer, obat bronchodilator, masker nebulizer	15-20	Alat Nebulizer terpasang	
4	Melakukan pencatatan dan pelaporan			ATK, PC/Laptop, jaringan internet, Rekam medis/buku register	5	Laporan pelayanan klinik	

Keterangan FLOWCHART



Mulai dan akhir proses
 Kegiatan berupa proses
 Pengambil keputusan dengan opsi